



CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO AUTOCLAVE HI-VAC PLUS



O único hospital brasileiro com três Certificações Ouro em
Soluções Integradas para a Saúde
2010

CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO AUTOCLAVE HI-VAC PLUS

1 LIGUE O BOTÃO NO PAINEL FRONTAL:



2 SURGE A TELA:



HABILITAR A IMPRESSORA: DIGITE TECLA 04

3 PRÓXIMA TELA:





4 SIGA OS PASSOS ABAIXO:

- 1 - TECLE **EDIT**
- 2 - TECLE O INTERVALO DE IMPRESSÃO (60 segundos) **TECLA 6 E TECLA 0**
- 3 - TECLE **ENTER**



5 SURGE A TELA:

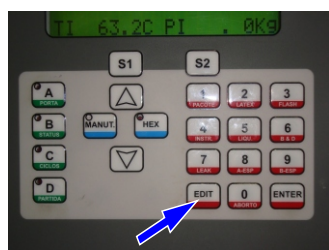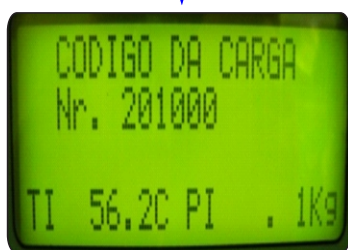

APARECE O CÓDIGO DA ÚLTIMA CARGA.


TECLA **EDIT** PARA CODIFICAR A PRÓXIMA CARGA.

6 PARA CODIFICAR A PRÓXIMA CARGA.



- DIGITE O NÚMERO DA AUTOCLAVE (**1 ou 2**) SEGUIDO DO **NÚMERO DO CICLO COM DOIS DÍGITOS**, EM SEGUIDA O **CÓDIGO DE SUA MATRÍCULA COM TRÊS DÍGITOS**
- NÚMERO DO LOTE: **SEIS DÍGITOS** (X XX XXX) NO FINAL TECLE **ENTER**.

7 SURGE A TELA:

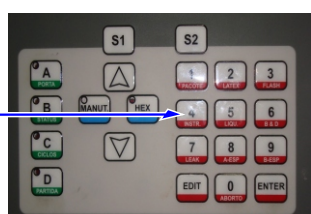

Selecione o programa usado conforme a rotina.

COM ESSA TELA ABERTA NENHUM COMANDO DE OPERAÇÃO (A, B, C e D) PODE SER ACIONADO.

8 SELEÇÃO DE PROGRAMAS:



CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO AUTOCLAVE HI-VAC PLUS

9 INÍCIO DA ROTINA:

INICIAR 1º CICLO DO DIA COM O **AQUECIMENTO** DA AUTOCLAVE SELECIONANDO O **PROGRAMA 4**. SEMPRE COM A **CÂMARA VAZIA**.



10 APARECE A TELA:



COM ESSA TELA, PARA SABER OS PARÂMETRO DO CICLO SELECIONADO, **TECLA B** PARA VISUALIZAR. PARA RETORNAR **TECLA B**.

11 OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO: FECHAR A PORTA

PRESSIONE A **TECLA A**, PARA FECHAR A PORTA.

OU A **TECLA C** SE QUISER **CANCELAR A SELEÇÃO** E ESCOLHER OUTRO PROGRAMA.

(SE VOCÊ PRESSIONAR A **TECLA C**, O EQUIPAMENTO RETORNA À SELEÇÃO DE PROGRAMAS).



12 OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

APÓS O FECHAMENTO DA PORTA, A **TECLA D** IRÁ **PISCAR**.

PRESSIONE A **TECLA D** PARA **DAR PARTIDA NO EQUIPAMENTO E INICIAR O CICLO**.




13 CICLO EM CURSO:

A IMPRESSÃO COMEÇA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CICLO E PARÂMETROS.




O CICLO CORRERÁ AUTOMATICAMENTE. NENHUMA AÇÃO É NECESSÁRIA NESTA FASE.

AO FINAL DO CICLO, UM ALARME SONORO IRÁ AVISAR QUE O CICLO ACABOU. A SEGUINTE TELA IRÁ SURTIR:

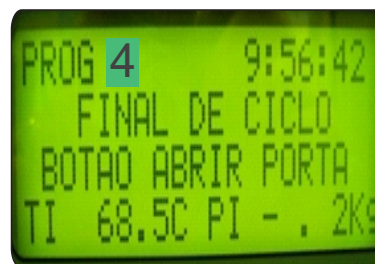


15 PRESSIONE A **TECLA A** PARA ABRIR A PORTA OU A **TECLA 8** PARA SILENCIAR O ALARME.


Tecla A para abrir a porta

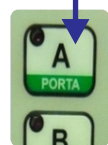

Tecla 8 parar o alarme sem abrir a porta

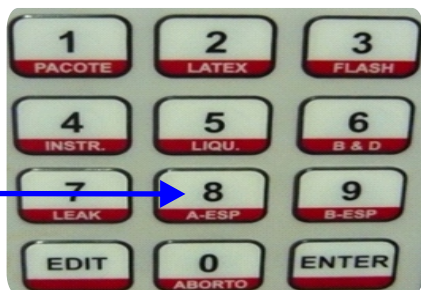

16 SURTIRÁ A TELA:

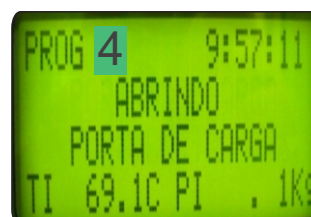

AGUARDAR DE **10 A 20 MINUTOS** PARA **RETIRAR O MATERIAL** DA AUTOCLAVE, (QUANDO CICLO COM CARGA).

CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO AUTOCLAVE HI-VAC PLUS


17 CICLOS SUBSEQUENTES:

AO FINAL DE CADA CICLO, A PORTA ABERTA, A TELA CÓDIGO DA CARGA SURGE MANTENDO SELECIONADO O CICLO ANTERIOR.



CODIFICAR A CARGA SEGUINTE.

18 SURGE A TELA:

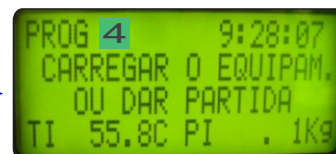

PARA REALIZAR UM NOVO CICLO CODIFIQUE A CARGA SEGUINTE.


COM A CARGA CODIFICADA, DAR PARTIDA OU SELECIONAR OUTRO PROGRAMA.



19 CICLOS SUBSEQUENTES: PARA MUDAR O PROGRAMA TECLE C




SURDIRÁ A TELA

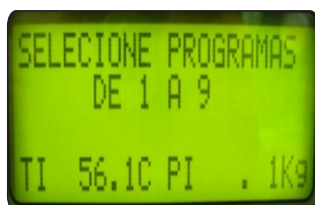

- SELECIONAR O **PROGRAMA 6 - BOWIE-DICK**
- SELECIONAR O **PROGRAMA 1 - 134°C**
- SELECIONAR O **PROGRAMA 2 - 121°C**
- SELECIONAR O **PROGRAMA 4 - DESEMBALADOS OU INDIVIDUAIS E EMBALADOS**

20 SURGE A TELA:

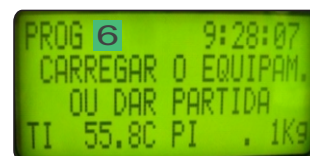

COM O PROGRAMA SELECIONADO, FECHAR A PORTA E DAR PARTIDA PARA INICIAR O CICLO.



21 CANCELAMENTO DE CICLO EM CURSO: PARA ABORTAR O CICLO TECLE 0



PARA CONFIRMAR O ABORTO **TECLA 1**

PARA CONTINUAR O CICLO **TECLA 2**



QUANDO A MÁQUINA ABORTAR, SOARÁ UM SINAL, TECLE 2 PARA SILENCIAR.

22 PARA MUDAR O PROGRAMA SELECIONADO TECLE C. SELECIONE O PROGRAMA DESEJADO.

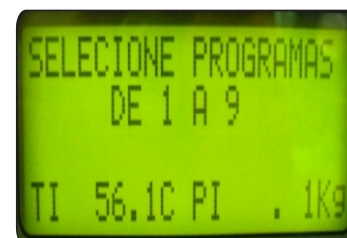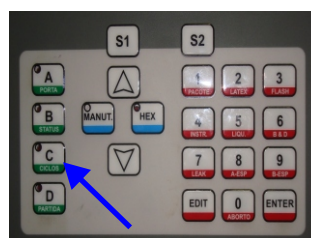

Elaboração: Engº Gerson Luqueta
Validação: Enfª Teresinha Neide de Oliveira
 Ac. Enf. Priscila Garcia
 Téc. Enf. Antonia Martins
 Téc. Enf. Roseli Cruz
 Téc. Diego Angelo
Diagramação: Wesley Coelho